



SERUM PHYSIOLOGIQUE 1 L POUR NEBULISATION ET IRRIGATION

- + Fabriqué en Europe
- + Dispositif médical de classe 1
- + 0,9% NaCl
- + Ne pas injecter
- + Bouchon refermable
- + Conserver à l'abri de la lumière
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN

Composition : Chlorure de sodium 0,9 g, eau purifiée q.s.p. 100 mL

Indications : Solution isotonique indiquée pour la nébulisation nasale et l'irrigation de surfaces corporelles non lésées. Utilisation en aérosols. Indiquée pour les enfants et les adultes. Tout incident grave survenu avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les utilisateurs et/ou les patients sont établis.

Mode d'emploi : Verser la quantité recommandée par le professionnel de santé dans l'appareil de nébulisation et procéder conformément aux instructions du fabricant de l'appareil. Appliquer directement sur des surfaces corporelles non lésées. Ne pas subdiviser le contenu de l'emballage afin de prévenir toute contamination du produit. Produit non injectable. Produit non stérile. Tenir hors de portée des enfants. Conserver le produit dans son emballage d'origine, bien fermé, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Refermer soigneusement après chaque utilisation. Manipuler avec des mains propres et sèches. Éviter le contact avec la zone d'ouverture.

Désignation	EAN13	CNK	Colisage
PUREPHY Sérum physiologique 1 litre	7863125008862	4941795	12